

Optitrol Multiallergy Food

Optitrol Multiallergy Inhale



Usage prévu

Optitrol Multiallergy Food et **Optitrol Multiallergy Inhale** sont des contrôles multiples permettant d'analyser la précision d'un test et de mettre en évidence les déviations analytiques des laboratoires d'analyses de biologie médicale. Ils sont utilisés comme contrôles de qualité pour la détermination qualitative des anticorps dans le sérum humain et avec des valeurs cibles liées à un système de test spécifique.

Les résultats mis à jour des tests et les valeurs cibles sont disponibles sur le site www.diamex.com ou peuvent être demandés par fax.

Les contrôles permettent d'identifier des erreurs occasionnelles du système et prend une part importante dans les bonnes pratiques de laboratoire s'il sont utilisés correctement d'après les instructions des différents fabricants de kits commercialisés.

Contenu

Optitrol Multiallergy Food et **Optitrol Multiallergy Inhale** sont produit à partir de plasma humain. Seuls les plasmas testés individuellement et non-réactifs aux HBsAg, VIH 1/2 et VHC sont utilisés. **Optitrol Multiallergy Food** contient des anticorps IgE dirigés contre des paramètres alimentaires différents. **Optitrol Multiallergy Inhale** contient des anticorps IgE dirigés contre des paramètres respiratoires différents. Les paramètres contenu se trouvent dans les tableaux de valeurs cibles.

Stockage et conservation

Optitrol Multiallergy avant ouverture peut être utilisé jusqu'à la date de péremption indiquée, s'il est conservé entre +2°C et +8°C.

Après la première utilisation, le contrôle est stable pendant 90 jours, s'il est correctement refermé après usage et conservé entre +2°C et +8°C.

Les tubes doivent toujours être conservés à la verticale.

Mode opératoire

Optitrol Multiallergy doit être sorti de son emballage et être homogénéisé par rotation. Merci de vous référer à la fiche technique du kit ou du dispositif utilisé pour plus d'informations.

Limites

- Ne plus utiliser ce produit après la date de péremption.
- Ne plus utiliser le produit en cas de contamination microbienne ou de turbidité excessive.
- Suivre exactement les indications du fabricant de réactifs lors de l'analyse de ce contrôle. Tout écart par rapport à la procédure recommandée peut conduire à des résultats incorrects.
- Ce contrôle sert à l'assurance qualité et ne doit pas être utilisé pour l'étalonnage.

Les valeurs individuelles mesurées doivent se situer dans la plage de valeurs acceptables correspondantes. Les valeurs réellement obtenues peuvent cependant différer des valeurs cibles spécifiées pendant la durée de vie de ce contrôle. Les variations dans le temps et entre les différents laboratoires peuvent être dues à des différences de techniques de laboratoire, d'appareils, de réactifs ou à des modifications des méthodes d'analyse utilisées par le fabricant. Par conséquent, chaque laboratoire doit établir ses propres valeurs moyennes et ses plages de concentration. Les autres causes de variations possibles peuvent être les suivantes:

- différents lots de réactifs
- différents lots d'étalons
- différents modules de traitement
- Mesures à différents moments de la journée

Avertissements et instructions d'élimination des déchets

ATTENTION : Le contrôle est destiné à une utilisation diagnostique in vitro et ne doit être utilisés que par un personnel formé.

Même si le contrôle a été testé et est négatifs pour HBsAg, VIH 1/2 et VHC, il doit être considéré comme potentiellement infectieux, car aucune méthode ne peut exclure complètement le danger potentiel d'une infection. Lors de la manipulation, le produit doit être traité avec le même soin qu'un échantillon de patient. Ce produit contient comme conservateur de l'acide de sodium. Ce produit contient également du méthylisothiazolone, un composant du ProClin.

L'élimination du produit devra s'effectuer en conformité avec les directives locales ou nationales.

 **ATTENTION :** Contient du méthylisothiazolone.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Prévention :

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
- P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection/ équipements de protection des yeux/du visage.

Intervention :

- P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
- P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Conditionnement



- Optitrol Multiallergy Food référence AL0104 : 2 x 2,5 mL
- Optitrol Multiallergy Inhale référence AL0107 : 2 x 2,5 mL

Explication des symboles utilisés

								
Référence	Conformité aux normes européennes	Usage in vitro	Numéro de lot	Date de péremption	Attention	Consulter la notice d'emploi	Fabriqué par	Conservé entre +2°C et +8°C